

# Bruksanvisning for AL-6000 Prestige™

## Prosedyre for gjennomføring av promillemåling

### Active Mode: Promillemåling med munnstykke (anbefalt)

- Hold av/på-knappen inne. Promillemåleren viser vekselvis "Fsr", "nor" og hvor mange målinger som har blitt gjennomført.
- Slipp av/på-knappen når "nor" vises. Det indikerer Active Mode.
- Den automatiske oppvarmingsprosessen som gjør promillemåleren klar for måling begynner. Dette varer omkring 20 sekunder (en nedtelling fra 250 til 000 vises).
- Blås sakte og jevnt inn i munnstykket i minst 5 sekunder. Når du hører 2 korte pipelyder er målingen utført, og promillemåleren gjennomfører en analyse (sifferet "0" beveger seg fra venstre til høyre).
- Etter at analysen er gjennomført kan du avlese alkoholkonsentrasjon med 2 desimalers nøyaktighet. Resultatet vises i 15 sekunder før promillemåleren blir slått av automatisk.

### Passive Mode: Promillemåling uten munnstykke

- Hold av/på-knappen inne. Promillemåleren viser vekselvis "Fsr", "nor" og hvor mange målinger som har blitt gjennomført.
- Slipp av/på-knappen når "FSr" vises. Det indikerer Passive Mode.
- Den automatiske oppvarmingsprosessen som gjør promillemåleren klar for måling begynner. Dette varer omkring 20 sekunder (en nedtelling fra 100 til 000 vises)
- Blås sakte og jevnt ca. 2 cm fra promillemålerens åpning i minst 5 sekunder. Når du hører 2 korte pipelyder er målingen utført, og promillemåleren gjennomfører en analyse (sifferet "0" beveger seg fra venstre til høyre).
- Etter at analysen er gjennomført kan du avlese alkoholkonsentrasjon. Resultatet vises som "0" (tilsvarer 0,0-0,1 promille), "Lo" (tilsvarer 0,2-0,4 promille) eller "H" (tilsvarer 0,5 eller høyere promille).
- Etter at målingen er utført vises "FSr" og man kan umiddelbart foreta en ny måling. Promillemåleren slår seg av automatisk etter 15 sekunder.

## Advarsel

- Den nordiske modellen av AL-6000 Prestige™ viser resultatet i promille.
- Etter at man har drukket skal man vente 30 minutter før man foretar en promillemåling. Årsaken til dette er å få maksimal alkoholkonsentrasjon i blodet.
- Unngå promillemåling under sterk vind og i forurensede rom.
- Dersom "BAT" vises i displayet må batteriene erstattes med nye.
- Dersom "OUT" vises i displayet har promillemåleren ikke gjennomført en tilfredstillende måling, og den vil deretter slå seg av automatisk.
- Dersom displayet viser "FLO" har du blåst utilstrekkelig og/eller ujevnt.
- Dersom "CAL" vises i displayet må promillemåleren kalibreres. Kontakt din forhandler.
- Ikke kjør i påvirket tilstand. Alkohol kan ha en alvorlig effekt på din dømmekraft og dine kjøreevner. Det er alvorlige straffer for å kjøre mens du er påvirket av alkohol.
- Den norske promillegrensen på veien er 0,2, mens den på sjøen er 0,8.
- Promillemåleren gir en indikasjon på din promille. Produsent, importør (Precision Norge AS) og forhandler gir ingen garanti på at du ikke har promille.
- Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig dersom promillemåleren viser feil.